


医療用ダイオードレーザー

LightSheer® Duet

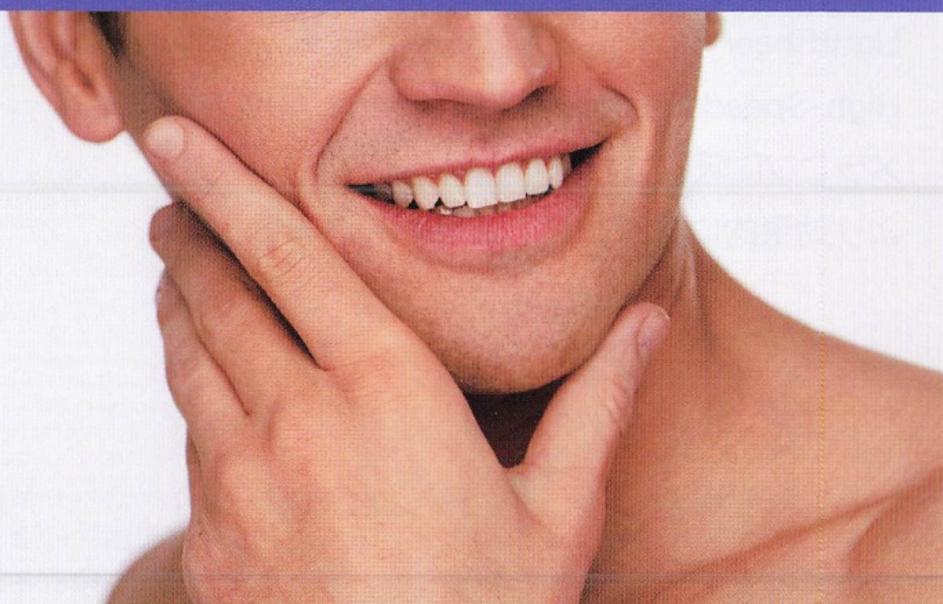

医療脱毛 で
魅せる肌 を
手に入れる

✓ 男性ヒゲ

✓ ワキ

✓ ヒザ下

✓ VIO

✓ ヒジ下

✓ 背中

医療脱毛とは…

毛に含まれるメラニン組織にレーザーの光を吸収させ、毛の組織を破壊する減毛方法です。メラニン組織は肌にも含まれているため、毛の生えている周囲の肌を保護しつつ、毛に含まれるメラニンのみを破壊するようにレーザーを照射する必要があります。

LightSheer®Duet は 2 つの高度な技術、ChillTip™と High-Speed Integrated Technology (HIT) によってメラニンに吸収されやすいダイオードレーザーをより効果的に発揮させて減毛を行います。

LightSheer® Duet 承認番号 30200BZX00004000




LightSheer® Duet ふたつのテクノロジー

High-Speed Integrated Technology (HIT™)



皮膚を吸引して毛の組織をエネルギー源に近づけます。皮膚を引き伸ばすことで毛のメラニンに効率よくエネルギーを到達させます。

吸引によって触覚を刺激するので痛みを感じにくくなります。また、広い部位を短時間で施術することができ、冷却や麻酔は必要ありません。

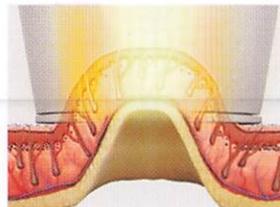


ChillTip™テクノロジー



ChillTip™コンタクトクーリングで皮膚を冷却することにより、痛みを軽減します。麻酔も必要ありません。

皮膚に押し当てて照射することで毛のメラニンに効率よくエネルギーを到達させます。また、パワー設定によって、様々な部位の毛にも対応できます。

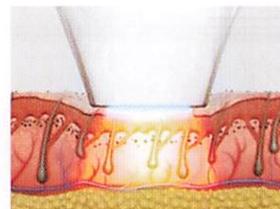

Before

After

男性ひげ





ET ハンドピース使用 4 回治療後
30ms にて 1tx 15J / 2tx 16J / 3tx 16J / 4tx 18J

わき



H5 ハンドピース使用 3 回治療後
カスタムモードにて 1tx 6J / 2tx 6.5J / 3tx 8J

お腹

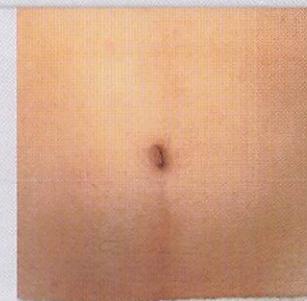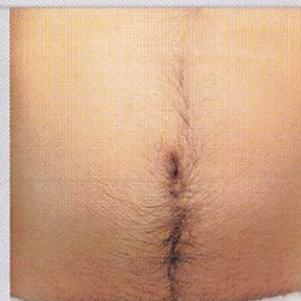

H5 ハンドピース使用 3 回治療後
カスタムモードにて 1tx 6J / 2tx 6J / 3tx 6J

・効果、副作用には個人差があります。詳しくは担当医にお問合せください。
・医療脱毛は自由診療です。費用は担当医、もしくはスタッフにお問合せください。
症例写真ご提供：堀内祐紀先生（秋葉原スキングクリニック）

むだ毛の処理

むだ毛の処理にはかみそりや除毛剤、電気針を使った処理など様々な方法がありますが、痛みを伴ったり、炎症を起こすことが少なくありません。このような肌への負担は、しみ(炎症後色素沈着)や毛穴の開き(開大毛穴)などを引き起こすこともあります。

毛の組織に含まれるメラニンに吸収されたレーザーは熱となり毛根・毛乳頭の組織や周辺の毛包の組織を破壊します。



レーザー減毛の治療回数

1回減毛したらその部分からは二度と毛が生えてこないと思っている方も多いと思いますが、実は減毛できる毛とできない毛があります。減毛できるのは毛乳頭や毛根がある成長期の毛だけで、休止期や退行期の毛は減毛できません。このため複数回の治療が必要になります。

治療回数は減毛する部位や状況によって異なりますので、詳しくは担当医師もしくはスタッフにご相談ください。



起こりうる副作用

治療の後に、皮膚の赤み・ほてり、火傷、色素沈着などの副作用が起こる可能性があります。詳しくは、担当医・もしくはスタッフにご相談ください。